

Meso Skin Perfector®

DK-2-2020



MESO SKIN PERFECTOR®
Step by Step

mesoskinline®

MILANO - HAMBURG - COPENHAGEN *By Aleksandra Kjaersfeldt*

FORM ANSIGTET MED CONTOUR

MAKING MAGIC MED MESO SKIN PERFECTOR®

SÅDAN ANVENDES

MESO SKIN PERFECTOR® LIGHT

Anbefales til personer med meget lys hud, til reduktion af fregner og misfarvning af huden forårsaget af akne og aldring.

Brug denne skygge til en meso-kontur BB-behandling i ansigtet som en highlighter (se billedet).



MESO SKIN PERFECTOR® NATURAL

Medium beige med rosa undertoner og er velegnet til personer med varmere hudtoner. Bruges til at opnå en afbalanceret hudfarve til lys hud med brun hyperpigmentering.



MESO SKIN PERFECTOR® MEDIUM


Velegnet til solbrun hud eller personer med gyldne hudtoner og anbefales til medium til mørke hudtoner.



Anbefales som en mørk kontur til en meso-kontur BB-behandling i ansigtet (se billedet).



Anbefalet Meso Håndstykke

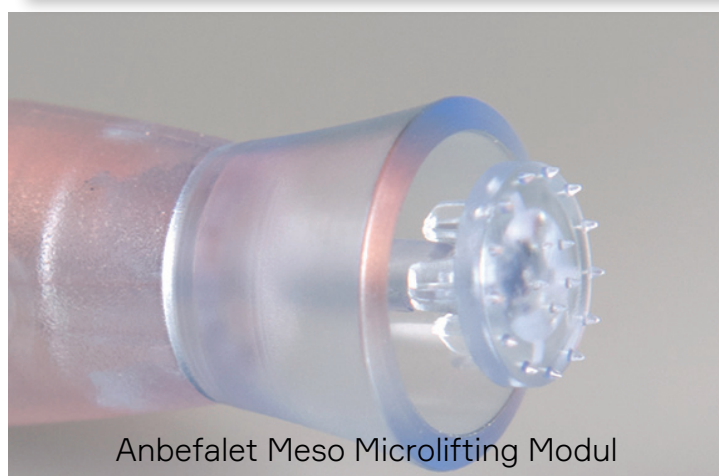

Anbefalet Meso Microlifting Modul

CERTIFIED
mesoskinline®
ACADEMY



ACCREDITED
EDUCATION
PROGRAMMES



For optimalt og risikofrit resultat

- 4-8 behandlinger med ca. en uges mellemrum, afhængig af alder og hudtype.
- Vedligeholdes herefter med en enkelt behandling hver 3. måned.

PROFESSIONEL BRUG: INSTRUKTIONER TRIN FOR TRIN

MAKING MAGIC MED MESO SKIN PERFECTOR®

4-8 behandlinger med ca. en uges mellemrum, afhængig af alder og hudtype. Vedligeholdes herefter med en enkelt behandling hver 3. måned.

TRIN 1: MESO PURE PEEL

Forbered huden grundigt med MESO PURE PEEL, inden enhver MESO SKIN PERFECTOR® behandling.

- Rens området, der skal behandles, og fjern evt. makeup omhyggeligt
- Masser MESO PURE PEEL forsigtigt på området. Skyl ikke.

Aktive ingredienser

Lactic Acid, Citric Acid, Malic Acid, Bisabolol, Citrus Grandis Fruit Extract, Vaccinium Myrtillus Leaf Extract, Citrus Lemon Peel Extract



TRIN 2: VÆLG DET KORREKTE NÅLMODUL

Klargør håndstykket med et mikrolifting modul eller lignende. Brug **ALDRIG** Microneedling-moduler.

Juster Microlifting modulet til maksimum længde og indstil maskine til en hastighed 100-120 slag/sek. afhængigt af hudfølsomhed.

Du kan behandle alle områder (hænder, ansigt, hals, décolleté eller krop) med microlifting modulet, da det ikke er invasivt og derfor ikke vil traumatisere huden, men vil forbedre hudkvaliteten, selv på arvæv.



TRIN 3: PÅFØR MESO SKIN PERFECTOR®

Vælg den rigtige farve

- **Light:** til lyse hudtoner
- **Natural:** til rosa hudtoner
- **Medium:** til mørkere hudtoner

Påfør et tyndt lag MESO SKIN PERFECTOR® til et lille område ad gangen. Behandl hvert område (5 cm x 10 cm) i cirkulære bevægelser med et moderat tryk på kinderne og intet tryk omkring øjne eller på panden, i 2-3 minutter. Behandl pigmentpletter eller arvæv lidt længere. Rens ikke huden men efterlad det overskydende MESO SKIN PERFECTOR® på huden og gå til næste trin af behandlingen.



TRIN 4: MESO ANTI-AGE MASK

Transdermal dobbelt lags masken påsættes efter behandlingen, direkte ovenpå den resterende del af MESO SKIN PERFECTOR® der er tilbage fra behandlingen. Dette hjælper huden med at absorbere endnu mere af produktet. Lad masken være på i 20-40 minutter afhængig af klientens alder og hud, da masken har stærk anti-age virkning og hudforyngelsesegenskaber. Hydrogel Face Masken er let og hurtig at bruge (forudskåret) og de 3D-retikulære strukturer sikrer maksimal vedhæftning til huden. De aktive ingredienser, er specielt udvalgt til behandling af alle hudtyper. Den beroliger og fugter huden og forebygger irritation.



TRIN 5: MESO LIFT AND PROTECT (SPF50+)

Når du har fjernet masken, skal du tørre resten af MESO SKIN PERFECTOR® af med vand.

Påfør et tyndt lag MESO LIFT AND PROTECT på de behandlede områder. Følg op med et let mineralpudder hvis nødvendigt. MESO LIFT AND PROTECT er en solbeskytter, der er egnet til daglig brug. Ideel dagcreme til tør, sart, fotodermatose, lysfølsom hud.

MESO LIFT AND PROTECT er et multifunktionelt anti-age produkt med en stærk virkning, der varer op til 8 timer.



Hovedkontor, salg, distribution og showroom

mesoskinline[®]
mesoskinline ApS

Juelsmindevej 57
DK-7120 Vejle
Danmark

(+45) 71 74 11 08
sales@mesoskinline.com
www.mesoskinline.dk

Innovative
non-invasive
mesoterapi løsninger



mesoskinline[®]

MILANO - HAMBURG - COPENHAGEN *By Aleksandra Kjaersfeldt*